

PHAGO'SPRAY DM

Használatra kész alkohol alapú fertőtlenítő spray

Felhasználhatóság

- Fertőtlenítő- és tisztítószer a felületek szakszerű fertőtlenítéshez és tisztításhoz.
- Bármilyen felületen használható, amely ellenáll az alkoholnak.

Jellemzők

- Széleskörű fertőtlenítőszer; baktériumölő, vírusölő, gombaölő.
- A VAH-listában feljegyezve.

Használati leírás

A Phago'spray DM használatra kész. Permetezze a terméket egy egyszer használatos törülköendő vagy használja közvetlenül a tisztítandó felületen. Ne öblítse le! Behatási idő: 15 perc (VAH)

Összetétel

Aktív hatóanyag:

Etanol (CAS 64-17-5): 24 % w/w

Didecil-dimetil-ammonium-klorid (CAS 7171-51-5): 0,14 % w/w

Alkylamine (CAS 2372-82-9): 0,25 % w/w

Fizikai-kémiai jellemzők

Megjelenés: Folyékony, átlátszó

Szín: Színtelen

Illat: grapefruit

Sűrűség: (20 °C): 0.968 g/ml

pH-érték: (100 %): 9,5 - 11

Biztonság és szállítás

Vigyázat! UN 1993

Tárolás

5°C felett használja. Lehetőleg 0°C felett tárolja.

Lejáratási idő: 3 év

Kiszerezés

Kanna: 5 l

Antimikrobiális tevékenység

Standard	Concentration	Time
BACTERICIDAL		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> and <i>S. aureus</i>)	0.5%	1 min
EN 1276 clean conditions (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> and <i>S. aureus</i>)	80%	15 min
EN 13697 clean conditions (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> and <i>S. aureus</i>)	100%	5 min
EN 13697 dirty conditions (<i>S. typhimurium</i>)	10%	5 min
EN 13727 dirty conditions (<i>E. hirae</i> , <i>S. aureus</i> and <i>P. aeruginosa</i>)	50%	5 min
FUNGICIDAL		
EN 1275 (<i>C. albicans</i>)	2.5%	15 min
EN 13697 clean conditions (<i>C. albicans</i>)	100%	15 min
EN 13624 clean conditions (<i>C. albicans</i>)	25%	5 min
MYCOBACTERICIDAL		
EN 14348 clean conditions (<i>M. avium</i>)	50%	15 min
VIRUCIDAL		
EN 14476 (Rotavirus)	90%	5 min
HIV1	100%	1 min
HBV	0.25%	10 min
EN 14476 (Influenza A/H1N1)	80%	30 s

Körültekintően használja a csíraölőt!
Használat előtt olvassa el a címkét és a teméken lévő információkat!